

SCHEDA TECNICA di PRODOTTO
AMPOLLA NEBULIZZATRICE IN POLIPROPILENE
COD.123

Caratteristiche del prodotto

Ampolla Nebulizzatrice - dispositivo medico in materiale plastico (PP) che utilizzato con un compressore d'aria conforme alle normative in atto, trasforma il prodotto medicinale liquido in forma aerosolica.

Fabbricante: F.Ili Marchesi srl

Classe di appartenenza IIa

Modalità di confezionamento Vedi scheda di Produzione

Destinazione d'uso e modalità d'utilizzo

Dispositivo predisposto esclusivamente alla nebulizzazione di medicinali in particelle per consentire la perfetta penetrazione fino alle più profonde vie respiratorie.

La nebulizzazione avviene mediante l'immissione di aria nell'ampolla attraverso un apparecchio per aerosol terapia e la somministrazione avviene tramite l'utilizzo dell'accessorio di cura più adatto (maschera, forcina nasale o boccaglio).

Materiali utilizzati

Polipropilene PURELL HP371P

Additivo colorante RIFRATENE PE BLU DL/24 FNT

Caratteristiche tecniche

Capacità Massima <i>Maximum Capacity</i>	7 ml
Pressione minima in uso <i>Minimum pressure in use</i>	0,6 bar
Pressione max. in uso <i>Maximum pressure in use</i>	1,7 bar


CARATTERISTICHE DI USCITA

AMPOLLA <i>Atomizer</i>	FLUSSO <i>Flow</i>	Output Rate 1 min. (μ l/min.)	Total (μ l/min.)	Volume Output Rate (ml/min.)	MMAD* (μ m)	GSD**
POLY-123	Min.	5.21	95.76	0.115	1.6	1.5
	Max	126	311.8	0.190	2.8	3.3

* **MMAD**(Mass Median Aerodynamic Diameter)

** **GSD** (Geometric standard deviation)

ANALISI GRANULOMETRICA

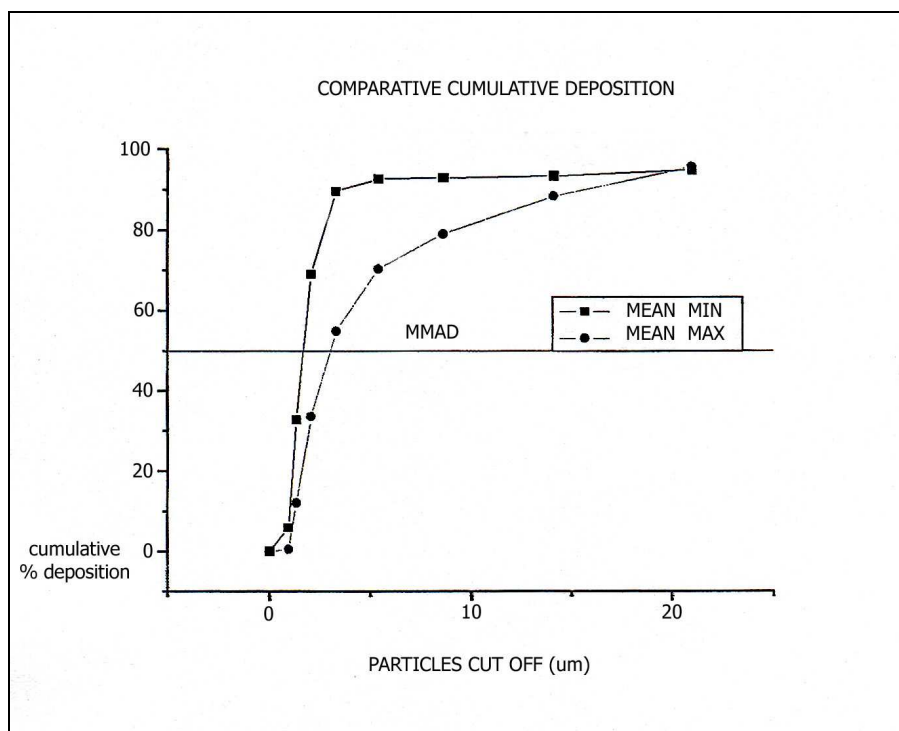

Pulizia e disinfezione

Dopo l'uso svitare l'ampolla e pulire tutte le parti con acqua tiepida e detergente neutro, risciacquare con cura e lasciare asciugare su un panno pulito.

Per l'eventuale disinfezione utilizzare prodotti sterilizzanti seguendo le istruzioni del prodotto stesso.

Non pulire con acqua bollente, né sterilizzare a vapore.

Conservare in luogo asciutto e pulito lontano dai raggi solari.

Modalità di consegna

A mezzo corriere interno o esterno

Disposizioni di sicurezza

Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 6 anni perché contiene parti che possono essere ingerite.
Manipolare con cura.

L'ampolla è un dispositivo mono-paziente.

Si consiglia di usare l'ampolla per 90 trattamenti al massimo.

Verificare sempre che il dispositivo medico sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

Approvata da: RQ

Aggiornata al 01-12-11

