

**SCHEDA TECNICA di PRODOTTO**  
**Accessori per AMPOLLA IN VETRO**  
**Forcelle Nasali in vetro COD. 201/202**  
**Boccaglio in vetro Cod. 204.**

**Caratteristiche del prodotto**

Accessori di cura in vetro per aerosolterapia

**Fabbricante: F.LLI MARCHESI SRL**

**Classe di appartenenza: II A**

**Modalità di confezionamento** Vedi scheda di Produzione

**Destinazione d'uso e modalità d'utilizzo**

Accessori di cura in vetro applicabili per mezzo di un raccordo morbido in materiale plastico (PVC medicale) alla Ampolla universale in vetro per aerosolterapia.

**Materiali utilizzati**

Vetro Durobax - Borosilicato prodotto dalla Schott

Vetro Flint – Borosilicato prodotto dalla Kimble

**Pulizia e disinfezione**

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente il nebulizzatore ed i suoi accessori in vetro con acqua corrente e sanificare con prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto stesso oppure tramite bollitura. Sterilizzare mediante autoclave.

**Modalità di consegna**

A mezzo corriere interno o esterno

**Disposizioni di sicurezza**

Accessori in vetro, manipolare con cura.

Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 6 anni perché l'eventuale rottura provocherebbe una proiezione di schegge pericolose.

Prima di ogni utilizzo esaminare visivamente l'accessorio per verificarne l'integrità.

Conservare in un luogo sicuro, possibilmente avvolto in un panno di protezione asciutto e pulito.

Verificare sempre che l'accessorio sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

Approvata da: RQ

Aggiornata al 01-12-11

