

F.LLI MARCHESI S.R.L.

**NEW
UNIVERSALE**

Ampolla per Aerosolterapia

SPEEDY NEB

Colori Disponibili

- MENTA
- BLU
- ROSA
- MELA



SPEEDY NEB

La nuova ampolla, in grado di soddisfare le necessità curative di tutta la famiglia, nasce dall'esperienza pluridecennale della nostra azienda nella progettazione e produzione di componenti per aerosolterapia.

Completamente rinnovata nella forma e nello stile viene proposta in vari colori che rendono accattivante e divertente questo strumento di cura.

Il vantaggio di avere più colori per lo stesso nebulizzatore impedisce la contaminazione accidentale in pazienti con patologie differenti consentendo ad ognuno di avere il proprio dispositivo inconfondibile per tutto il ciclo curativo.

Semplice da utilizzare e completamente compatibile con gli accessori della serie Rapid, è UNIVERSALE e funziona con tutti i compressori per aerosol attualmente disponibili e conformi alle normative vigenti.

Per i pazienti più piccoli è richiesta la supervisione di un adulto e se ne consiglia l'utilizzo con il tubo di connessione lungo 2 mt per mantenere silenzioso il luogo di cura.

L'ampolla SPEEDY NEB è un dispositivo medico in classe II A



F.LLI MARCHESI S.R.L.



SPEEDY NEB aerosol efficace

Vie Aeree Superiori
> 5 µm

Trachea e Bronchi
tra 2 e 6 µm

Alveoli
tra 0.5 e 3 µm



Dalle analisi realizzate in laboratorio disposte da F.LLI MARCHESI per il nebulizzatore SPEEDY NEB (090406_QCN021PQR.doc_nebulizer performance disponibili per la consultazione presso la nostra sede), messe a confronto con le caratteristiche ideali fornite come riferimento dalla norma UNI EN 13544_1, il dispositivo rientra nei requisiti essenziali per realizzare una cura corretta di aerosolterapia dove la granulometria necessaria deve essere compresa tra 1 e 10 micron.

Il nebulizzatore è in grado di funzionare con differenti flussi d'aria ed è quindi applicabile ai diversi compressori disponibili sul mercato senza perdere la propria efficacia, la distribuzione particellare, costante tra 1 e 3 micron è in grado di raggiungere le vie più profonde (alveoli).



Istruzioni per l'uso

Indicazioni: Utilizzato con un compressore d'aria conforme alle normative in atto, trasforma il prodotto medicinale liquido in forma aerosolica per poterlo somministrare attraverso le vie respiratorie.

Modo d'uso: Con riferimento alla numerazione indicata nella figura dei componenti, seguire le seguenti istruzioni: **A)** sbloccare in senso antiorario l'ampolla e dividerla in due parti (5) e (7).

B) riempire la parte inferiore (7) con il medicinale prescritto dal Medico facendo attenzione al corretto inserimento dell'ampolla (6)

C) innestare le due parti e chiudere in senso orario.

D) inserire il tubo (8) proveniente dal compressore d'aria.

E) applicare l'accessorio di cura serie RAPID più adatto: Maschera Baby (1) o Adulto (2), Nasale (3), Boccaglio (4). eventualmente è disponibile un elastico (9) da applicare a vostra discrezione alla maschera prescelta.

Avvertenze: Prima della terapia con il prodotto medicinale verificare il corretto funzionamento dell'ampolla con 2 ml. di acqua distillata nebulizzando per pochi secondi. Capacità massima 7 ml.

Conservare lontano dai raggi solari e da fonti di calore dopo un'accurata pulizia ed asciugatura.

Pulizia e disinfezione: Dopo l'uso dividere l'ampolla e pulire tutte le parti con acqua tiepida e detergente neutro, risciacquare con cura e lasciare asciugare su un panno pulito.

Per l'eventuale disinfezione, utilizzare prodotti specifici seguendo le istruzioni riportate sul prodotto stesso.

Non pulire in acqua bollente, né sterilizzare a vapore.

Conservare in luogo asciutto e pulito come indicato nelle avvertenze.

Attenzione: Per l'utilizzo da parte dei bambini sotto i 6 anni è necessaria la supervisione di un adulto perché l'ampolla contiene parti che possono essere ingerite. Manipolare con cura.

Il set è **mono-paziente** e viene distribuito in confezione **NON STERILE**.

Verificare sempre che il dispositivo medico sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

Consigli: Dispositivo medico adatto alla cura di tutta la famiglia è disponibile in diversi colori.

Con l'ausilio di un adulto è possibile effettuare la terapia inalatoria anche ai più piccoli e l'utilizzo del tubo da 2 mt. permette di rendere silenzioso il luogo di cura tenendo a distanza il generatore d'aria compressa.

Usare l'ampolla per 90 trattamenti al massimo.

Smaltimento: Come rifiuto in plastica riciclabile.



F.LLI MARCHESI S.R.L.

Via Copernico 14/16
20060 Cassina de' Pecchi (MI) - ITALY



REF 223



Agg. 11/2013

Tel. 02 9529218 / 9529278 Fax. 02 9529346 www.fratellimarchesi.it info@fratellimarchesi.it REV.0 del 06-11-2013

F.LLI MARCHESI S.R.L.